

Utilisation des poches de perfusion Ecoflac® et Ecobag® de BBraun

Dans le cadre de l'arrêt de production définitif des poches de perfusion Sintetica-Bioren au premier trimestre 2022, nous allons prendre en remplacement les poches des gammes Ecoflac® et Ecobag® de BBraun, qui répondent à la majorité de nos exigences.

Poches de perfusion Sintetica-Bioren



Ecoflac® BBraun - Poche rigide



- Contient de l'air
- Non adaptée à la mise sous pression
- Peut être stocké debout
- **A privilégier pour des questions de coût**
- Deux ports plats avec film de protection individuel
- Matériau polyéthylène, sans PVC ni latex
- Compatible avec les tubulures avec trocard fin et pointu
- La poche se collabait lors de l'utilisation (graduation non linéaire sur étiquette)
- Stockage à T°_{amb} (15-25°C). Peut être chauffé à l'étuve ou au bain-marie (max. 40°C et stable 4 semaines si date exp. valable encore au moins 6 mois). Peut être mis au frigo entre +2°C et +8°C.
- Identification produit avec code couleur
 - Solutions d'électrolytes
 - Solutions d'hydrates de carbone

Eau

Ecobag® BBraun - Poche souple



- Sans air avec suremballage stérile
- Adapté à la perfusion sous pression
- Nécessite plus de manipulations
- Génère plus de déchets
- **Économiquement plus cher**
- Deux ports plats avec capuchons de protection
- Matériau 3 couches : externe polyester, intermédiaire polyéthylène, intérieur polypropylène, sans PVC ni latex
- Compatible avec les tubulures avec trocard fin et pointu
- Ne pas retirer le suremballage lors du stockage (pas de données de stabilité)
- Stockage à T°_{amb} (15-25°C). Peut être chauffé à l'étuve ou au bain-marie (max. 40°C) sans suremballage (stable 24h). Peut être stocké au frigo entre +2°C et +8°C avec suremballage (pas de données sans suremballage).

Utilisation d'un transfert-set SteriTex Codan

- Remplace le transfert-set Bioren
- Emballage stérile.
- Pour la reconstitution / transfert du solvant de dilution directement dans un flacon de médicaments et inversement.
- Disponible au magasin central (n°art. EHC 105823)



Étiquetage des poches pour perfusion

- Toujours identifier la poche de perfusion en collant une étiquette dûment remplie et signée.
- Ne pas utiliser de stylo marqueur (risque d'absorption du feutre à travers la poche).
- Deux tailles d'étiquettes disponibles à la PIC.

