

MATERIEL D'ADMINISTRATION POUR LA VOIE ORALE ET ENTERALE

Rédacteur	N. Marcoz	Version 0.4 Date 07.2020
Vérificateur	S. Buhlmann, M. Monnet	
Approbateur	N. Schaad	

Les seringues à usage oral et entéral ENFit® sont remplacées par les seringues Nutrisafe® 2 de la marque Vygon. Cette modification ne concerne pas les stupéfiants liquides oraux pour adultes pour lesquels il faut à utiliser les seringues B. Braun Exadoral. En effet, l'usage nous a montré que les seringues Nutrisafe ne sont pas adaptées pour la dispensation de tels médicaments.

Les seringues Nutrisafe® 2 ont un volume mort plus petit et sont ainsi plus sécuritaires notamment pour l'utilisation en néonatalogie et pédiatrie.

Elles restent compatibles avec le système de connexion ENFit® à l'aide d'un adaptateur.



Ce mémo permet de vous aider à choisir le matériel adéquat en fonction de la situation clinique.

Règles générales :


- N'utiliser que des seringues Nutrisafe® 2 pour la préparation et l'administration de liquides oraux ou entéraux (sauf les stupéfiants liquides oraux pour adultes).
- Tout prélèvement de liquide oral ou entéral à partir d'un flacon nécessite obligatoirement de placer le bouchon vissable violet sur votre flacon. Si vous devez prélever le contenu d'une ampoule, vous pouvez utiliser la canule de prélèvement.
- Les seringues Nutrisafe® 2 et les adaptateurs violets seront à commander au stock central et à garder en stock dans l'unité de soins.
- Pour le prélèvement des stupéfiants liquides oraux pour les adultes, commander les seringues Exadoral® à la PIC. Par contre pour la pédiatrie ou la néonatalogie, le prélèvement des stupéfiants liquides oraux se fera avec le matériel Nutrisafe®
- Le matériel Vygon ne contient ni DEHP, ni latex

MATERIEL

1) Seringues

Désignation	Volume	N° article	Photo	Utilisation
Seringue Nutrisafe	1 mL	110 820		Préparation, stockage et administration de lait et de médicaments par voie entérale ou orale. Peut se fixer sur le bouchon vissable violet ou sur une sonde Nutrisafe. Pour connecter à une sonde ENFit : utiliser l'adaptateur n°110 816
	2, 5 mL	110 821		
	5 mL	110 818		
	10 mL	110 826		
	20 mL	110 827		
	60 mL	110 819		
Seringue Exadoral	1 mL	PIC : 10807		Prélèvement des stupéfiants liquides oraux pour adultes
	5 mL	PIC : 10803		
	10 mL	PIC : 10805		


2) Bouchon pour flacons oraux

Désignation	taille	N° article	Photo	Utilisation
Bouchon vissable Nutrisafe	Diamètre 25 mm	110 825		A placer sur tout flacon de liquide oral pour remplacer le bouchon d'origine. Permet le prélèvement des liquides avec une seringue Nutrisafe® uniquement.


MATÉRIEL D'ADMINISTRATION POUR LA VOIE ORALE ET ENTERALE

Rédacteur	N. Marcoz	Version 0.4 Date 07.2020
Vérificateur	S. Buhlmann, M. Monnet	
Approbateur	N. Schaad	


3) Canule de prélèvement

Désignation	taille	N° article	Photo	Utilisation
Canule prélèvement Nutrisafe	Diamètre 1,2 mm, Longueur 5 cm	110 823		Pour le prélèvement de lait ou de médicament liquide à partir d'une ampoule ou d'un flacon sur lequel n'irait pas le bouchon violet (essentiellement pour la pédiatrie)



4) Bouchons pour seringues

Désignation	taille	N° article	Photo	Utilisation
Bouchon pour seringues Nutrisafe		110 824		Permet de capuchonner une seringue de façon hermétique

5) Prolongateur

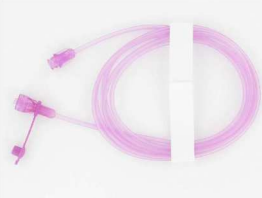Désignation	taille	N° article	Photo	Utilisation
Prolongateur Nutrisafe	Diamètre 1,5 mm Longueur 150 cm	110 822		Réservé à la pédiatrie S'utilise avec les sondes Nutrisafe.

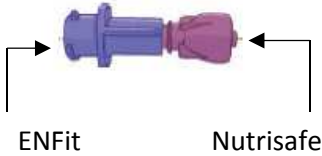

6) Adaptateurs de connexion

Désignation	taille	N° article	Photo	Utilisation
Adaptateur Nutrisafe > ENFit (OVEACC510)	Volume mort 0,10 mL	110 816		Permet de connecter une tubulure ou une sonde ENFit avec une seringue Nutrisafe
Adaptateur ENFit > Nutrisafe (368.72)	Volume mort 0,10 mL	110 817		Permet de connecter les sondes d'alimentation Nutrisafe au matériel ENFit (Amika)

MATERIEL D'ADMINISTRATION POUR LA VOIE ORALE ET ENTERALE





Rédacteur	N. Marcoz	Version 0.4 Date 07.2020
Vérificateur	S. Buhlmann, M. Monnet	
Approbateur	N. Schaad	

7) Tubulures

Désignation	taille	N° article	Photo	Utilisation
Tubulure Easy Bag Amika ENFit Fresenius		110 171		Administration d'alimentation entérale par la pompe Amika Fresenius (adultes, grands enfants)
Tubulure ENFit Amika Varioline Fresenius		109 358		Administration d'alimentation entérale par la pompe Amika Fresenius (grands enfants)

SONDES


1) Sondes disponibles au stock central

Désignation	taille	N° article	Photo	Utilisation
Sonde de nutrition Nutrisafe PUR	5 Fr, 75 cm	110 814	 Code couleur bouchon pour déterminer rapidement la charrière de la sonde.  04 Fr 05 Fr 06 Fr 08 Fr 10 Fr 12 Fr Peuvent rester en place jusqu'à 4 semaines mais pour des raisons d'hygiène : changer au bout de 7 j selon recommandations locales.	Pour la pédiatrie. Sonde sans mandrin. Remplace la sonde Gribi (art. EHC 104117)
	6 Fr, 125 cm	110 815		Pour la pédiatrie. Sonde avec mandrin (mandrin à éliminer dans un bac « piquants-tranchants » après la pose). Remplace la sonde FloCare (art. EHC 104262)
Sonde Freka ENFit Fresenius	8 Fr, 120 cm	101 689		Pour nutrition entérale, avec tubulure et pompe Amika chez l'adulte
Sonde Freka PEG ENFit	15 Fr, 35 cm	103 735	 Freka® PEG Set gastric FR 15, ENFit	Pour nutrition entérale, avec tubulure et pompe Amika chez l'adulte


Rédacteur	N. Marcoz	Version 0.4 Date 07.2020
Vérificateur	S. Buhlmann, M. Monnet	
Approbateur	N. Schaad	

2) Montage de base pour les sondes entérales

➤ Montage seringue Nutrisafe sur sonde nutrisafe (pédiatrie)

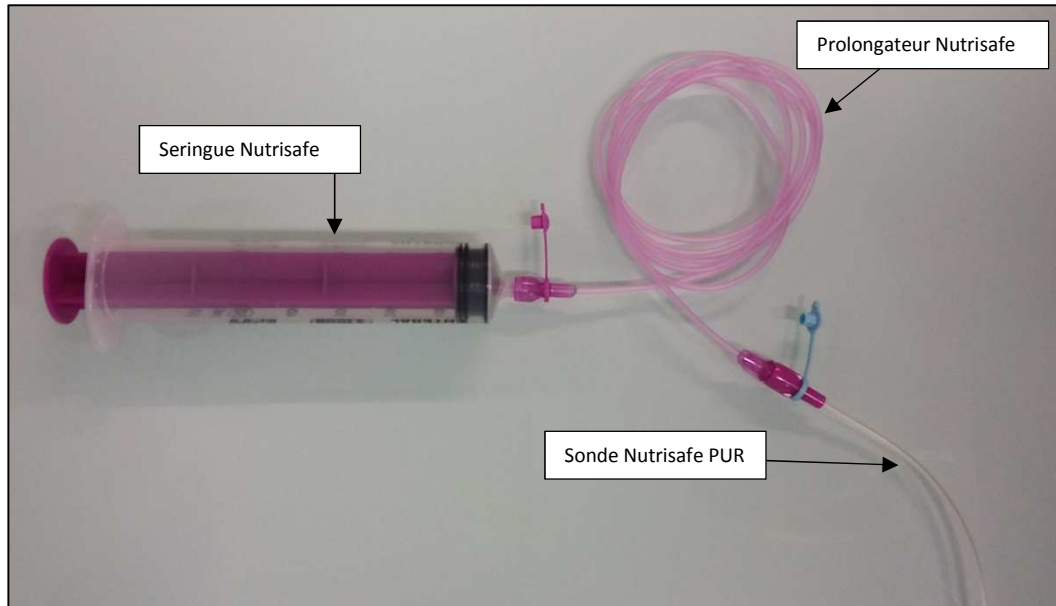


➤ Montage seringue Nutrisafe sur matériel ENFit + sonde Nutrisafe sur tubulure ENFit

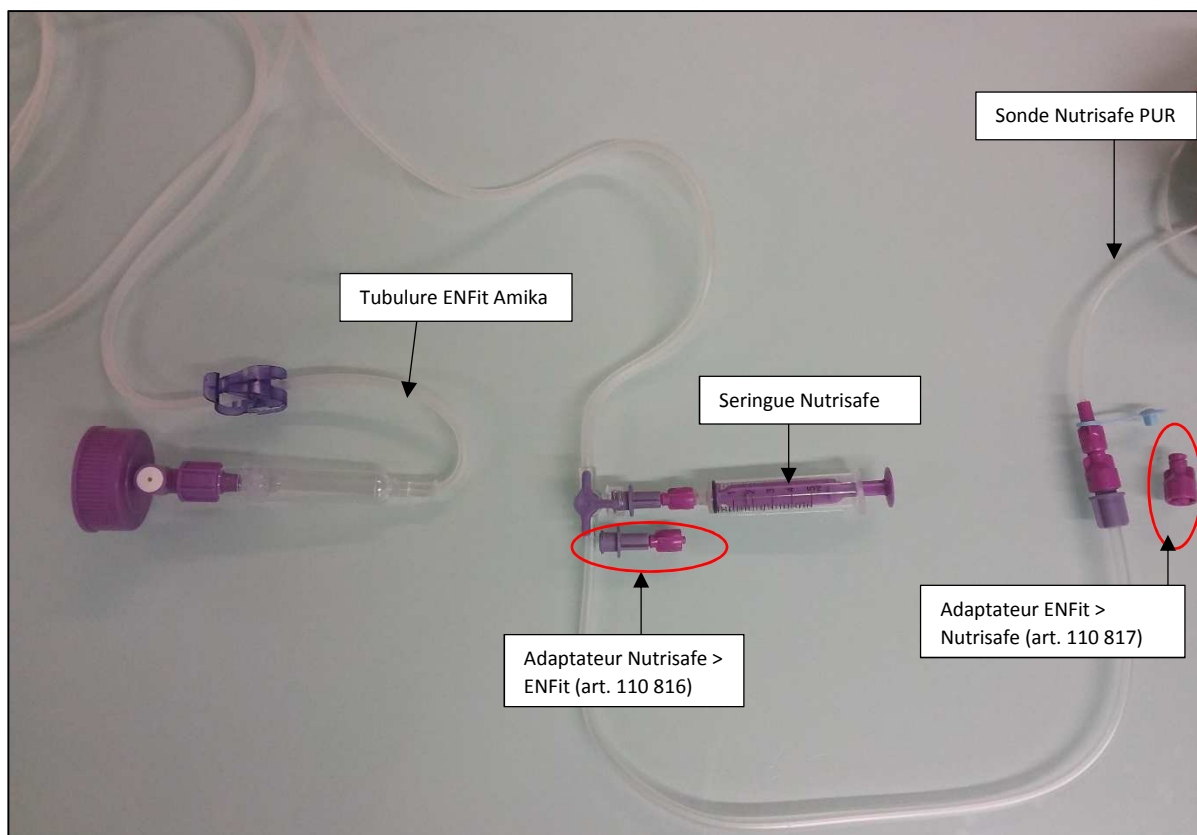

Idem pour les adultes avec sonde Freka ENFit

Rédacteur	N. Marcoz	Version 0.4 Date 07.2020
Vérificateur	S. Buhlmann, M. Monnet	
Approbateur	N. Schaad	

3) Résumé des utilisations possibles avec les seringues Nutrisafe

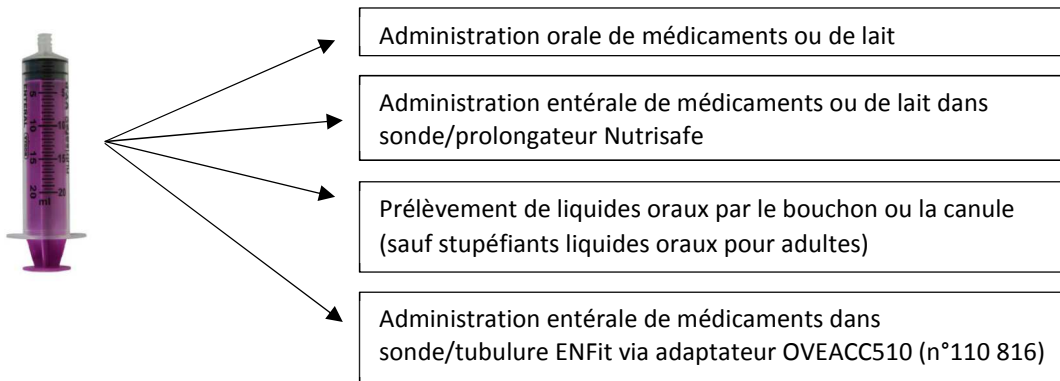

PRELEVEMENT DE SOLUTIONS ORALES

Le bouchon vissable doit être placé sur tout flacon de liquide oral. Enlever le bouchon d'origine et le remplacer par ce bouchon violet.



Pour prélever dans des ampoules ou dans des flacons sur lesquels le bouchon ne s'adapterait pas, vous pouvez utiliser la canule de prélèvement (spécifiquement en pédiatrie).

Cas des stupéfiants : pour les adultes prélever le volume avec une seringue B.Braun Exadoral® à aboucher directement sur le dispositif blanc qui se trouve à l'intérieur du goulot.

Pour la pédiatrie/néonatalogie, utiliser le système Nutrisafe® comme décrit ci-dessus.



Exception : L'Oxynorm® doit continuer à être utilisé avec la seringue spéciale délivrée par le fabricant

Deux pratiques sont possibles pour le prélèvement :

- Utilisez une seule seringue par flacon (une seringue neuve à chaque nouveau flacon). Après utilisation la seringue sera rebouchée avec un bouchon et attachée au flacon jusqu'à sa prochaine utilisation. Ne pas laisser la seringue sur le bouchon du flacon. Ce bouchon sera refermé.

MATERIEL D'ADMINISTRATION POUR LA VOIE ORALE ET ENTERALE


Rédacteur	N. Marcoz	Version 0.4 Date 07.2020
Vérificateur	S. Buhlmann, M. Monnet	
Approbateur	N. Schaad	

- Utilisez une nouvelle seringue à chaque prélèvement si l'usage répété est peu hygiénique (solution visqueuse, administration en bouche) ou si la fixation au flacon n'est pas pratique.

La manipulation avec les nouvelles seringues peut sembler un peu différente au début. En effet la seringue ne se visse pas sur le bouchon (le pas de vis sert à connecter la seringue sur les sondes). Elle s'enfonce simplement dans l'ouverture du bouchon et il peut apparaître une sensation de moindre adhérence par rapport aux seringues Exadoral®.

Pour assurer un prélèvement adéquat, il faut donc :

- 1) Connecter la seringue sur le bouchon violet
- 2) Retourner le flacon et le maintenir verticalement
- 3) Prélever lentement le volume désiré
- 4) Placer le flacon horizontalement en maintenant bien le piston de la seringue avant de déconnecter celle-ci. Ne pas déconnecter avec le flacon à l'envers.

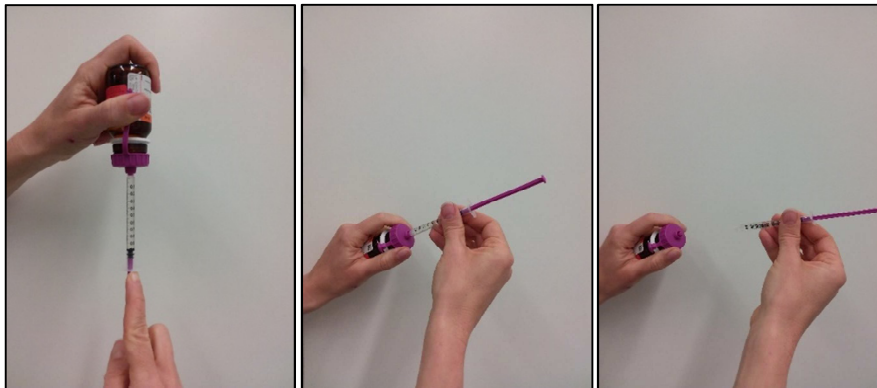

- 5) Refermer le flacon

Références :

- Matériel ENFit et schéma d'administration par voie orale/entérale, Pharmacie des HUG, 2017
- Informations du fabricant Vygon, avril 2019